

Betriebsanleitung

SANDURET EASY

LABORGERÄTE IN EDELSTAHL



REITEL Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20 | 49152 Bad Essen
Tel.: +49(0)5472-9432-0 | Fax: +49(0)5472-9432-40
www.reitel.com | info@reitel.com

Sehr geehrter Kunde!

Das SANDURET Easy von REITEL ist ein kompaktes und leistungsstarkes Sandstrahlgerät, das wenig Platz benötigt und sich ideal für kleine Labore eignet. Die robuste Edelstahlkonstruktion sorgt für Langlebigkeit und Hygiene, während das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis modernen Technologiezugang ermöglicht. Der leichtgängige Fußschalter verbessert die Ergonomie, und das flexible Kammerdesign erlaubt eine einfache Anpassung an individuelle Anforderungen. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt für optimale Sicht. Standardmäßig wird eine 75-110µm-Kammer mitgeliefert, zusätzliche Varianten (25-75µm, 75-110µm) bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Dank des praktischen Plug-in-Systems lassen sich Strahlkammern mühelos austauschen oder nachrüsten.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Benutzer, bzw. Betreiber des Gerätes. Bitte vor dem Aufstellen und der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig beachten.

Nach dem Auspacken des Gerätes ist zu prüfen, ob Transportschäden irgendwelcher Art aufgetreten sind. Beanstandungen sind innerhalb von 3 Tagen dem Transportunternehmen oder dem Hersteller zu melden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

Diese Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten, empfehlen wir, die Betriebsanleitung an einem geschützten Ort in der Nähe des Gerätes aufzubewahren. Diese Dokumentation ist im Sinne des Urheberrechts geschützt. Die Weitergabe und Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise, sowie eine Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet.

INHALTSVERZEICHNIS

1	TECHNISCHE BESCHREIBUNG	4
1.1	GRUNDAUSSTATTUNG	4
1.2	SONDERZUBEHÖR	4
1.3	GERÄTEBESCHREIBUNG	5
1.4	TECHNISCHE DATEN	7
2	SICHERHEITSHINWEISE.....	8
2.1	ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.....	8
2.2	GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE	9
3	AUFSTELLUNG	10
3.1	INSTALLATION	10
3.2	BEFÜLLUNG DER KAMMERN	10
4	BEDIENUNG	11
4.1	INBETRIEBNAHME	11
4.2	WECHSEL DER KAMMERN	11
4.3	SANDSTRAHLEN VON FISSUREN	11
5	STÖRUNGSHILFEN	12
6	WARTUNG.....	13
7	GARANTIE.....	14
8	ENTSORGUNGSVORSCHRIFTEN	18
9	ERSATZTEILELISTE.....	19
10	EU-RICHTLINIE	20

1 Technische Beschreibung

1.1 Grundausrüstung

- SANDURET EASY mit einer Kammer (75-110 μm)
- Düse aus Hartmetall
- Trichter zum Einfüllen des Strahlgutes
- Netzkabel
- Fußtaster
- Montagewerkzeug zum Schlauchwechseln

1.2 Sonderzubehör


- Best.-Nr.: 12910000 DUSTY MINI HEPA
- Best.-Nr.: 17902000 DUSTY COMFORT
- Best.-Nr.: 24700001 Zusatzkammer 25-75 μm
- Best.-Nr.: 24700002 Zusatzkammer 75-110 μm

- Düsen aus Hartmetall

(bei Bestellung bitte gewünschtes Durchflussmaß mit angeben)

1.3 Gerätebeschreibung

- 1 Hauptschalter
- 2 Schutzglasscheibe mit Schutzfolie
- 3 Anschlussstutzen für Absaugung
- 4 Geräteanschluss für Fußtaster
- 5 Geräteanschluss für Netzkabel
- 6 Steckdose für Absaugung (Stromversorgung)
- 7 Druckluftanschluss
- 8 Verschlusschraube für Schutzglasscheibe
- 9 Lederhanddurchführung
- 10 Strahlmittelkammer
- 11 Verschluss für Strahlmittelkammer

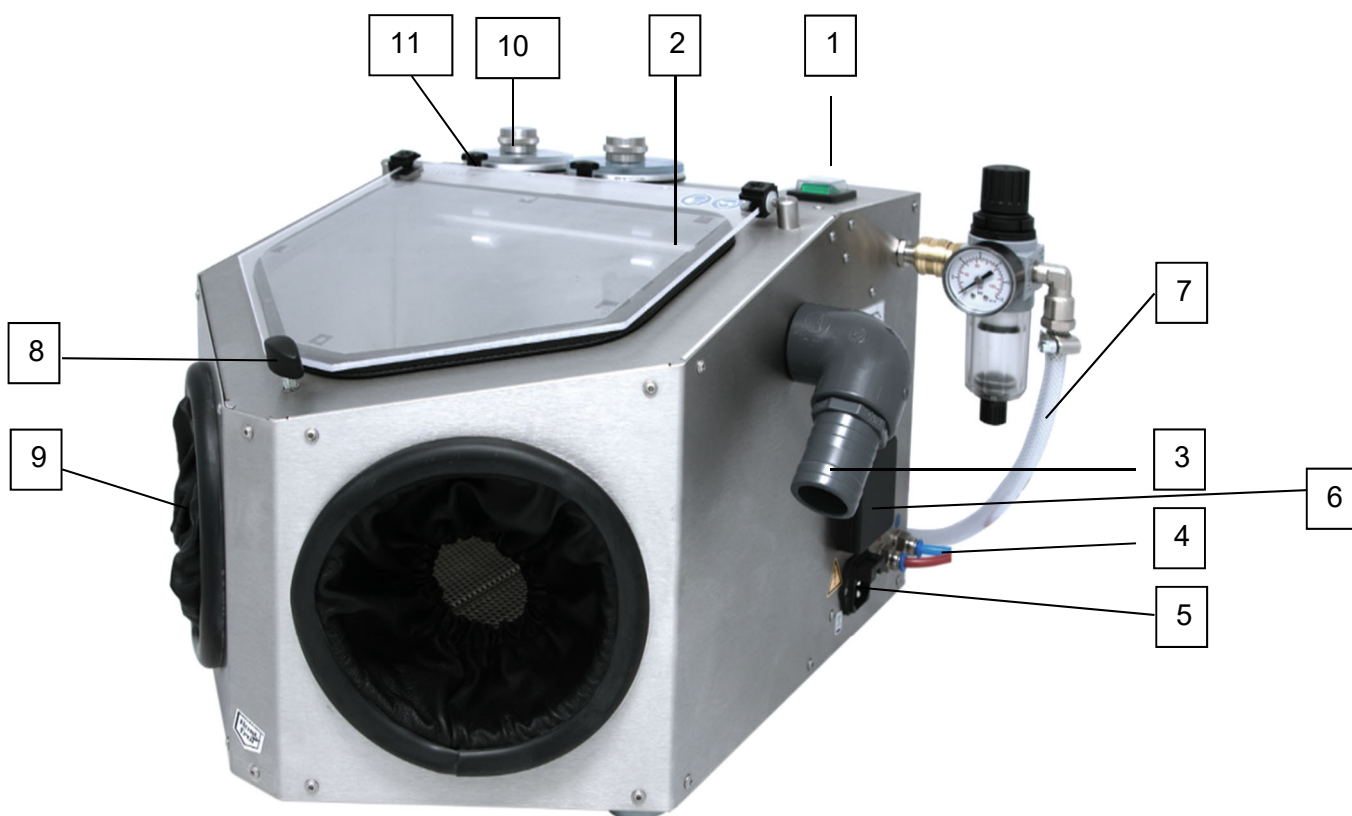

1.4 Technische Daten

Netzanschluss	230 V/50–60 Hz
Aufnahmeleistung	10 W
Höhe/Breite/Tiefe	45 x 40 x 35 cm
Gewicht	11 kg
Luftverbrauch	ca. 80 l/min.
Druck	0,5–6 bar
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Gehäuse	Edelstahl
Best.-Nr.:	14700000
Made in Germany	
Deckel-Öffnung	270 mm x 250 mm

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Jedes Gerät verlässt nach Endprüfung und einem Probelauf das Werk. Sollte jedoch durch Transport oder andere Umstände das Gerät beschädigt oder verändert sein, so darf es nicht in Betrieb genommen werden. Kontrollieren Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Beschädigte Teile sind sofort zu ersetzen.
- Alle elektrischen- und sonstigen Versorgungsanschlüsse dürfen nur entsprechend der technischen Daten angeschlossen werden. Die Werte dürfen nicht über- oder unterschritten werden. VDE-Vorschriften beachten. Nur zugelassene Schutzkontaktverbindung einsetzen.
- Die Vorschriften bezüglich eventuell erforderlicher Prüfungen (z.B. nach Berufsgenossenschaften oder elektrischer Anlagen) obliegen ausschließlich dem Käufer/Nutzer des Produktes.
- Dieses Gerät ist für einen Gebrauch entsprechend der technischen Beschreibung konzipiert und somit nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Jede andere Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig – hierbei erlischt die Haftung des Herstellers.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.
- Das Gerät nur in einem beheiz- und belüftbaren, sauberen Raum, ggf. unter einer Abzugshaube aufstellen.
- Die Aufstellfläche soll eben, gerade und eine dem Gebrauch entsprechende Stabilität aufweisen.
- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.
- Zur Vermeidung jeglicher Verletzungsgefahr ist angemessene Schutzkleidung zu tragen und entsprechendes Hilfswerkzeug zu verwenden (wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Zangen).
- Sind die zu erwartenden Arbeitsergebnisse nicht erfüllt, darf mit dem Gerät nicht weitergearbeitet werden. Für jeglichen Folgeschaden, der durch Weiterbenutzung entsteht, haftet der Eigentümer.
- Um Wasser-, Feuer- und Explosionsschäden zu vermeiden, unbedingt nach Arbeitsende oder Arbeitsunterbrechungen alle zuführenden Energiequellen absperren und gegen unbefugte Betätigung absichern.
- Bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sowie vor dem Öffnen des Gerätes, immer erst den Hauptschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.

- Reparaturen sind nur von qualifiziertem und zertifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Es gelten die Bestimmungen in Kapitel 7 zur Garantieleistung.
- Bei Verdacht auf eindringende Flüssigkeit Betrieb stoppen und Service kontaktieren.
- Alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit überprüfen, ggf. Schlauchschellen nachziehen.

2.2 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

Achtung:

Die Korngrößen der Strahlsandkammern sind unbedingt einzuhalten. Ein feineres Korn als 25 µm ist nicht zulässig und verstopft die Belüftungseinrichtung.

Die Strahlmittelkammern dürfen nur im drucklosen Zustand geöffnet werden.

Die Strahlmittelkammerdeckel müssen immer eben und sauber aufliegen und mit der Verschlusschraube festgeschraubt sein, bevor die Arbeit mit dem Gerät gestartet wird.

Die Verwendung von Flüssigkeiten oder ausgasenden Mitteln ist nicht erlaubt.

Verwendungszweck nur unter Beachtung der Herstellerangaben und -vorschriften.

Bitte prüfen Sie regelmäßig das Gerät auf Wasseransammlungen in der Wartungseinheit (siehe Kapitel 6).

- Beim Arbeiten die Glasscheibe geschlossen halten und das Gerät an eine geeignete Absaugung anschließen.
- Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr Arbeitshandschuhe und Mundschutz tragen.
- Das Gerät darf nur mit handelsüblichen ungefährlichen pulverförmigen Strahlmitteln betrieben werden.
- Es dürfen keine gesundheitsschädlichen Strahlmittel, Gase oder Flüssigkeiten verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht mit anderen Gasen als Druckluft verwendet werden.
- Die Verschlusschraube (12) darf nur bei drucklosem Gerät geöffnet werden.
- Der Sandstrahl darf ausschließlich auf zu reinigende Gegenstände gehalten werden, niemals auf lebende Objekte.
- Keine staubempfindlichen Geräte oder Einrichtungen in der Nähe des Gerätes aufstellen.
- Bei austretendem Strahlmittel Benutzung einstellen und den Service anrufen.

3 Aufstellung

Die elektrische Ausrüstung wird inkl. Kaltgerätestecker und Netzkabel geliefert und kann mit Ihrem haushaltsüblichen 230 V/16 A Anschluss betrieben werden. Beachten Sie zur Aufstellung die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

3.1 Installation

1. Stellen Sie nun eine Stromverbindung her, indem Sie das Gerät anhand des Netzkabels mit Ihrem Stromanschluss verbinden.
2. Stellen Sie über den mitgelieferten Druckluftanschluss (7) die Druckluftverbindung (0,5 – 6 bar) her. (Länge des Druckluftschlauches: 1500 mm)
Mit dem Druckminderer den Druck regulieren – nicht über 6 bar einstellen.
3. Schließen Sie die Absauganlage wie folgt an:
 - Den Stecker der Absaugung in die Steckdose für die Absaugung (6) stecken,
 - den Absaugschlauch am Anschlussstutzen für die Absaugung (3) befestigen,
 - die Absaugung einschalten.
4. Befestigen Sie die Düsen an den Griffstücken. Bei Auslieferungszustand des Gerätes sind die Düsen vormontiert.

3.2 Befüllung der Kammern

Hinweis:

Die Kammern können jederzeit von Ihnen per einfachem Stecksystem ausgetauscht und für Ihren Zweck eingesteckt werden.

Zum Einfüllen des Strahlgutes in die Kammern bitte nur den mitgelieferten Trichter mit Einfüllstutzen verwenden. Um Überfüllung zu vermeiden, nicht mehr als 450 ml Strahlgut einfüllen. Der Einfüllbereich beim Befüllen muss sauber sein (Deckel, Schraubgewinde, Kammer-Aufblasdüse).

Kammern mit gewähltem Strahlmittel befüllen. Hierfür:

- Druck ablassen, Verschlusschraube öffnen und Verschlussdeckel abnehmen,
- mitgelieferten Trichter komplett einstecken (an Düsenkopf vorbeiführen) und mit Strahlmittel befüllen,
- Füllhöhe korrekt = bis Schraube – Lüftungsschlitz bleibt frei,
- Verschlussöffnung von Reststrahlmittel säubern (ggf. Pinsel verwenden),
- Verschlussdeckel dicht aufsetzen und mit Verschlusschraube wieder schließen.

4 Bedienung

4.1 Inbetriebnahme

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter ein.
2. Der Strahldruck lässt sich über den Druckminderer stufenlos bis max. 6 bar einstellen (einheitlich für alle Kammern).
3. Die Kammern werden über den im Strahlraum befindlichen Strahlmittelanwahlschalter ausgewählt (Farbkennung).
4. Den Strahlvorgang lösen Sie über den Fußtaster aus.
5. Nach Arbeitsende schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter aus.

4.2 Wechsel der Kammern

Mit dem Sanduret easy ist es möglich, die Kammern problemlos und schnell zu tauschen, um auch auf kleinem Platz verschiedene Strahlmittel nutzen zu können.

1. Ziehen Sie den Verschluss für die Strahlmittelkammer nach oben.
2. Trennen Sie per einfachem Stecksystem die Schläuche von der Strahlkammer.
3. Anschließend ziehen Sie die gesamte Strahlkammer nach oben aus dem Gerät.
4. Setzen Sie die neue Strahlkammer an den freien Platz.
5. Schließen Sie die Steckverbindungen wieder an und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
6. Drücken Sie den Strahlkammer-Verschluss wieder nach unten, dass die Kammer fest im Gerät sitzt.

4.3 Sandstrahlen von Fissuren

Mit unserem Sanduret ist das Sandstrahlen von Fissuren möglich. Dies bedeutet, dass die Düse so klein wie möglich gewählt werden sollte, um eine präzise Bearbeitung zu gewährleisten. Zudem sollte der Druck gering gehalten werden, idealerweise im Bereich von 2-3 bar. Durch diese Einstellung wird eine schonende und effektive Reinigung der Fissuren ermöglicht, ohne die umliegenden Strukturen zu beschädigen.

5 Störungshilfen

Strahl wird unregelmäßig.	a. Das Strahlmittel ist eventuell verschmutzt → Strahlmittel wechseln, Düse ggf. abschrauben und durchblasen. b. Falsche Düse eingeschraubt → Bitte die Düsenkonfiguration beachten. c. Zu wenig Strahlmittel im Tank → ggf. Strahlmittel nachfüllen. d. Düse ist eventuell verschlissen → Düse ggf. austauschen. e. Verstopfung innerhalb der Schläuche → Gegenblasen durch die Düse bei leerer Kammer und offenem Deckel
Das eingefüllte Strahlmittel ist klumpig, u.U. hat sich Kondenswasser gebildet.	a. Feuchtigkeit in der Kammer → Auf die Verwendung von trockenem Strahlmittel achten.
Arbeitsraum verstaubt stark.	a. Absaugleistung ist ggf. zu niedrig eingestellt → Absaugleistung erhöhen. b. Staubbeutel der Absaugung ist voll → ggf. Staubbeutel wechseln. c. Absaugung ggf. reinigen → z.B. Motorfilter wechseln.
Innenraumleuchte brennt nicht.	a. ggf. Netzkabel ziehen, prüfen und wieder einstecken. b. Leuchtmittel defekt → prüfen und ggf. austauschen.
Fußtaster hat Störungen.	Netzkabel überprüfen und ggf. richtig anschließen.

6 Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gerätes. Achten Sie z.B. auf sichtbare Beschädigungen an Gehäuse oder Netzkabel.
- Durch Abnutzung beschädigte Strahlmittelschläuche müssen ersetzt werden. Dieses ist keine Beanstandung, sondern Verschleiß. Die Schläuche im Geräteinnenraum lassen sich mit üblichem Werkzeug selbst wechseln. Durchgestrahlte Schläuche im Gerät müssen durch Fachpersonal oder durch die Firma REITEL ersetzt werden.
- Leeren und reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen. Nach dem Lösen der Verschlussstopfen an der Geräterückseite kann bei offener Kammer mit einem Staubsauger das Reststrahlmittel entzogen werden.
- Reinigen oder wechseln Sie regelmäßig den Filter der Absaugung.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den den Druckminderer.
- Reinigen Sie das Gehäuse in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Tuch, bzw. mit dem REITEL Edelstahl-Pflegespray.

Hinweis

Reinigen und pflegen Sie in regelmäßigen Abständen Ihr Gerät mit dem REITEL Edelstahl-Pflegespray (Artikel-Nr.: 90405000) zum Schutz vor Verunreinigungen und Korrosion. Es ist wasserabweisend und erzeugt einen Schutzfilm gegen Kalk, Gips und Staub.

7 Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir, die REITEL Feinwerktechnik GmbH, beginnend mit dem bescheinigten Verkaufsdatum eine 24-monatige Garantie (nur D, A, CH) dafür, dass dieses Produkt frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie richtet sich nach nachstehenden Bestimmungen:

Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service und regelmäßiger Wartung entsprechend den Angaben in unserer Betriebsanleitung einen Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler zeigen, werden wir oder der Fachhändler, bei dem das Produkt erworben wurde, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Ihre Rechte aus dieser Garantie beschränken sich auf den Anspruch auf Nacherfüllung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf jegliche Form von Schadenersatz gewährt diese Garantie nicht.

1.

Sollte es erforderlich werden, diese Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben oder direkt an unsere Serviceabteilung.

Kontakt:

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20

49152 Bad Essen

Deutschland

Telefon-Nr.: +49-(0)5472-9432-0 (Zentrale)

Fax-Nr.: +49-(0)5472-9432-40

E-mail: info@reitel.com

2.

Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen müssen Sie die Seriennummer und Originalrechnung, den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Ferner müssen Sie einen schriftlichen Mängelbericht erstellen und uns das beanstandete Produkt zusammen mit diesem, ordnungsgemäß verpackt und kostenfrei, auf Ihre Gefahr zukommen lassen. Wir behalten uns das Recht vor, Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produktes entfernt oder geändert wurden oder der Reklamation nicht beifügt sind.

3.

Garantiereparaturen müssen von uns oder entsprechend autorisierten Fachhändlern oder Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Unternehmen ausgeführt wurden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen, sowie Schäden, die dadurch am Produkt entstehen, von dieser Garantie nicht gedeckt werden.

4.

Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersatz leisten, gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. für das ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit.

5.

Sollte das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich von uns entwickelt und produziert wurde, müssen eventuelle Veränderungen am Produkt vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler des Produktes zurückzuführen und werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Kosten für derartige Umbauten oder Veränderungen sowie dadurch oder durch den Betrieb unter abweichenden Voraussetzungen am Produkt entstandene Schäden werden nicht erstattet.

6.

Ausgenommen von der Garantieleistung sind:

- Wartungs- und Inspektionsleistungen sowie Reparaturen oder Austausch von Teilen, bei denen es sich um Verschleißteile gemäß unserer Verschleißteilliste handelt;
- Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
- durch Missbrauch oder zweckentfremdete Verwendung des Produktes entstandene Schäden;
- durch falsche Installation des Produktes entstandene Schäden oder durch mangelnde Wartung (z.B. durch Verkalkung) verursachte Schäden;
- Schäden die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung, fehlendes Entkalken, unzureichende Pflege und Säuberung oder Nichteinhaltung der sonstigen im Rahmen der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Nutzungsregeln und Wartungsleistungen entstanden sind;

- Schäden die durch Nutzung des Produktes außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen entstanden sind;
- Schäden die nachweislich durch nicht originale Verbrauchs- oder Verschleißmaterialien entstanden sind;
- alle nicht direkt am Gerät entstandenen Schäden und sonstigen Nachfolgedefekte (z. B. Beschädigungen der Möbel durch Auslaufen von Wassers, Ausfall von Arbeitszeit, Material, Lohn und sonstige Folgeschäden).

Diese Garantie erlischt, wenn:

- an dem Produkt durch Sie oder durch einen Dritten Änderungen vorgenommen worden sind;
- das Produkt trotz Vorliegens eines Funktions- oder Gebrauchsmangels weiter betrieben wird.

7.

Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die unser Produkt legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.

8.

Verbrauchsmaterialien sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Ersatzteile unterliegen einer Garantie gegen Material-, Verarbeitungs- und Fertigungsfehler für die Dauer von 6 Monaten entsprechend den Bestimmungen dieser Garantiebedingungen.

9.

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers bleiben von dieser Garantie unberührt.

10.

Wir behalten uns das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung zu stellen, wenn Sie eine Reparatur nicht durchführen wollen und das Gerät unrepariert zurückgeschickt werden soll.

11.

Bitte beachten Sie:

Bei Reparatur und Austausch dieses Produktes können eingegebene persönliche Daten und Einstellungen verloren gehen oder beschädigt werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Datenverluste jedweder Art und leisten keinerlei Schadenersatz für derartige Datenverluste. Sie sollten vor Geltendmachung des Garantiefalls immer Sicherungskopien aller gespeicherten Daten und Einstellungen erstellen.

12.

Für diese Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Gerichtstand ist unser Geschäftssitz.

13.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen ganz oder teilweise unwirksam werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahekommt.

14.

Sollten Sie während der Reparatur oder Austauschzeit ein Mietgerät benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder an Ihren zuständigen Fachhändler. Falls dies möglich ist, werden wir Ihnen ein Mietgerät unentgeltlich zur Verfügung stellen. Ein Anspruch auf die Zurverfügungstellung eines Mietgerätes besteht jedoch nicht. Außerhalb der Garantiezeit wird für die Zurverfügungstellung eines Mietgerätes eine angemessene Mietgebühr zzgl. Transport und Verpackung erhoben.

8 Entsorgungsvorschriften



Entsprechend der geltenden Gesetzeslage werden unsere Geräte nach B2B-Vorschriften der ordnungsgemäßen Entsorgung für gewerbliche Endprodukte zugeführt. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

9 Ersatzteilliste

Best.- Nr. Ref.	Sanduret easy Ersatzteilliste / Spare parts list 03/2025	Stck Qty.	VE Unit
24598000	Düse 0,6mm für 50µ Nozzle 0,6mm for 50µ	1	Stck piece
24599000	Düse 0,8 mm für 110µ Nozzle 0,8 mm for 110µ	1	Stck piece
24600000	Düse 1,2 mm für 150µ Nozzle 1,2 mm for 150µ	1	Stck piece
24601000	Düse 1,5 mm ab 200µ Nozzle 1,5 mm from 200µ	1	Stck piece
24604200	Handschuhe für Sandstrahlarbeiten Größe 10 Pair of Gloves for sandblasting units, Size L	1	Paar
24604100	Handschuhe für Sandstrahlarbeiten Größe 7 Pair of Gloves for sandblasting units, Size S	1	Paar
24604000	Handschuhe für Sandstrahlarbeiten Größe 9 Pair of Gloves for sandblasting units, Size M	1	Paar
E6230750	Kunststoff-Schutzfolie, 5 St. Plastic protection foil, 5 pcs.	1	Pack
20280000	Lupe, mit Saugnapf, D75mm	1	Stck piece