

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20
49152 Bad Essen
Tel. 05472/9432-0
Fax. 05472/9432-40

Betriebsanleitung

3.6.03

B I O S T E A M C E N T E R

Technische Beschreibung

Mit dem BIOSTEAM – Center können Sie umweltfreundlich ohne Dampf-, Schmutz- und Wärmebelastung Ihren Dampfstrahler zur Reinigung verschmutzter Teile verwenden..



INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Zubehör
 - 1.1 Grundausrüstung
 - 2.1 allgemeine Sicherheitshinweise
 - 2.2 gerätespezifische Sicherheitshinweise
 - 3. Geräteinstallation
 - 4. Arbeitshinweise
 - 5. Störungshilfen
 - 6. Wartung
 - 7. Garantie
 - 8. Technische Daten
 - 9. Legende
 - Z1 Geräteübersicht mit Bedienelementen
 - A1 Ersatzteilliste
-

1. Zubehör

1.1 Grundausrüstung

1 Abdampfbox mit Absaugung, Stromanschluss, und Arbeitsleuchte

2.1 allgemeine Sicherheitshinweise

- Nach dem Auspacken, das Geräte auf Transportschäden prüfen und Beanstandungen, innerhalb von 3 Tagen melden.
- Bedienungsanleitung beachten und gut aufbewahren
- Die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung beachten.
- Zur Vermeidung von Verletzungen sind Schutzkleidung, Lärm- und Sichtschutzmittel zu tragen sowie Hilfswerkzeuge zu verwenden.
- Ein defektes oder schlecht funktionierendes Gerät darf nicht weiter in Betrieb genommen werden. Unregelmäßigkeiten sofort dem Händler melden.
- Bei Gefahr Gerät ausschalten und Hilfe holen.
- Dieses Gerät ist entsprechend dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden Jede andere Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Das Gerät darf nicht verändert werden.
- Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Nach Arbeitsende alle Energiequellen absperren.
- Alle elektrischen und sonstigen Versorgungsanschlüsse sowie die Abfallentsorgung entsprechend der Bedienungsanleitung und der am Aufstellort gültigen Vorschriften vornehmen.
- Reparaturen dürfen nur durch den qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Für die ordnungsgemäße Arbeitsdurchführung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) garantiert der Arbeitsdurchführende.
- bei nicht vom Hersteller genehmigten Geräteveränderungen erlischt jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch.
- Aufstellungsort: sauberer und klimatisierter Raum, zwischen 15 und 35grd
Achtung bei Brandgefahr : Feuer- und Brandbestimmungen einhalten. Rundum genügend Platzabstand lassen.
- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden

2.2 gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Der Dampfstrahl darf ausschließlich auf zu reinigende Gegenstände gehalten werden, niemals auf lebende Objekte bzw. auf Körperteile.

- Achtung: Verwendung von Entkalkungsmittel nur innerhalb ihres Verwendungszwecks unter Beachtung der Herstellerangaben und Herstellervorschriften.

3. Installation

- a) elektrische Verbindungen herstellen
- b) Geräteabstand zur Wand hinten 25cm nicht unterschreiten.
- c) Ablaufschlauch installieren.
 - c1) 30mm Schlauch aufstecken und das Auslaufende in einen Behälter **unter Wasser** stecken oder
 - c2) Waschmaschinenschlauch mit geschlossenem Wasserhahn montieren, der nur beim Wasserablassen geöffnet wird..

4. Bedienung - Arbeitshinweise

- **Gerät einschalten** **Hauptschalter (SE) „Ein“ /**
- **Abluftgebläse einschalten** **(SL): I=manuell oder II:automatisch über Bewegungssensor / 0 = Aus**
- **Teil in Position bringen**
- **Dampfstrahlpistole positionieren**
- **Teil abstrahlen / reinigen**
- **Arbeitsende** **(SE) Aus**

5. Störungshilfen

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Gebälse schaltet nicht ein | Einschaltautomatik defekt
- Sensoren verschmutzt --- abwischen / reinigen
Lüfter defekt – Service |
| Lampe schaltet nicht ein | Leuchtmittel defekt --- tauschen
elektrischer Fehler – Service benachrichtigen |
| Absaugleistung zu gering | Filter verschmutzt, - verstopft ---- tauschen
Lüfter defekt - Service |

6. Wartung

- | | |
|---|---|
| Absaugöffnungsfließ | ca. 1* pro Woche, je nach Verschmutzungsgrad erneuern |
| darunterliegendes Edelstahlgeflecht - | ca. alle 0,5 Jahre wechseln oder auswaschen |
| an der Geräterückseite befindliche Filterkassette | alle 4 Wochen, je nach Verwendungsgrad |
| In der Wasserauffangwanne befindet sich eine | je nach Wasserstand Wanne |

Wasserstandsanzeige

1*/Woche über den Kugelhahn entleeren

automatische Abschaltung gestört

Sensor 1* pro Woche mit einem feuchten Tuch reinigen
-nicht den Dampfstrahler dazu benutzen

7. Garantie

Wir leisten für unsere Geräte

1 Jahr Garantie

beginnend ab dem bescheinigten Verkaufsdatum. für alle Mängel, die nachweisbar Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler sind ausgenommen Verschleißteile und Schäden durch Sturz. Geräte zusammen mit einem Mängelbericht frei Haus und gut verpackt einsenden.

von der Haftung ausgeschlossen sind:

Schwankungen in der Energieversorgung s. technische Anschlußdaten

unsachgemäße Bedienung, nicht genehmigte Änderungen, Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen
Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung.

Alle Schäden durch Weiterverwendung einer als mangelhaft erkannten Maschine.

Leihgerät: wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Hotline: Im Falle einer Störung wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler

8. Technische Daten

BIOSTEAM	Technische Daten
Netzanschluß:	230 V / 50 Hz
Aufnahmeleistung:	200 W
Höhe, Breite, Tiefe:	635, 520, 510 mm
Gewicht:	24 kg
Luftleistung:	1860 m ³ /h
Geräuschpegel:	77 db (A)

9. Legende


- SE Schalter Ein
- SL Abluftgebläse Umschalter Ein- und Abschaltung
I: „man.“ (manuell) oder II: „aut.“ (automatisch)
0: „AUS“
- LI Lichtschranke
- FI-a Filterfließ – Wegwerfartikel



FI-va Edelstahlfilter

FI-k Kondensfließ – Rückwand

SD Steckdose – Stromanschluß für Dampfstrahlgerät

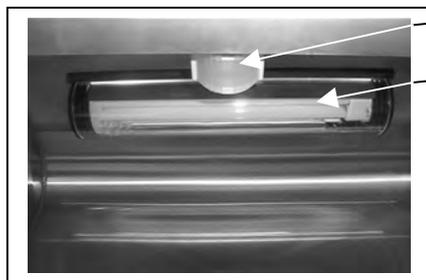


LI Lichtschranke


Leuchtmittel



FI-a Filterfließ

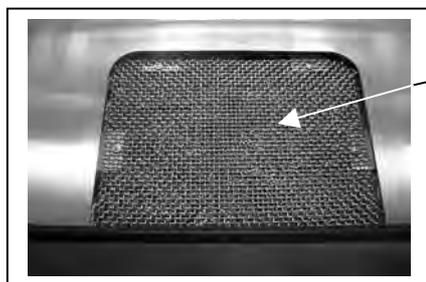

FI-va Edelstahlfilter

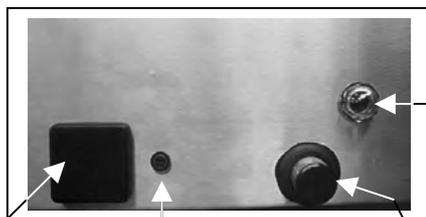


Füllstandsanzeige


Steckdose

Sicherung

Ablauf

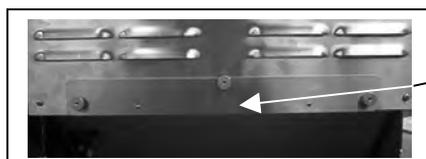

Hier befindet sich das Kondensfließ

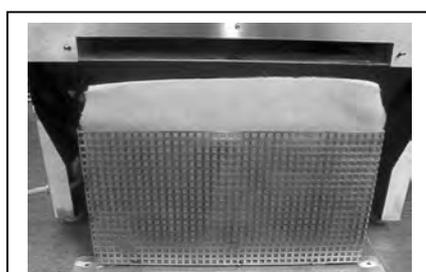

Kondensfließ ausgebaut